

Jak používat kompresorový inhalátor Innospire Essence


Inhalátor přeměňuje inhalační léčivo v roztoku na jemný aerosol tak, aby se inhalací dostalo co nejhluběji do Vašich plic. Sloužit Vám bude tak dobře, jak dobře o něj budete pečovat.

Příprava: 1 - 4

1 Postavte inhalátor na stůl.



2 Zapojte inhalátor do elektrické zásuvky.

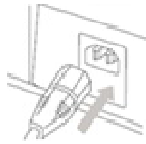


3 Napojte 1 konec průhledné hadice na nebulizační nádobku pro léčivo a druhý konec na výstup vzduchu na inhalátoru.



4 Odšroubujte dolní část nádobky, naplňte ji léčivem a našroubujte horní barevnou část nádobky zpět.



5 Na nádobku napojte náustek či masku dle svého komfortu. Aerosol s léčivem se nedostává do očí při použití náustku, proto může být náustek vhodnější. Některá léčiva musí být inhalována pouze náustkem.

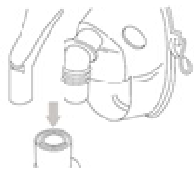

6 Inhalátor zapněte a ujistěte se, že se tvoří a z náustku vychází aerosol.



7 Sedte zpříma, vložte náustek do úst, pomalu nadechněte a vydechněte, totéž s maskou. Nesnažte se inhalovat rychle, inhalace nesmí být namáhavá. Zadýcháte-li se, vypněte kompresor a odpočiňte si.




8 Inhalace je u konce, jakmile začne inhalátor prskat. Vypněte inhalátor do polohy „0“.



Čištění inhalátoru: 1 - 4

1 Odpojte před čištěním inhalátor z elektrické zásuvky.

2 Jednou týdně proveďte kontrolu filtru a vyměňte ho, je-li špinavý.

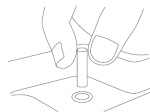


3 Otřete povrch inhalátoru jednou za měsíc vlhkým hadříkem.


4 Uchovávejte na bezpečném a suchém místě.

Čištění a údržba nebulizační nádobky: 1 - 4

1 Po každé inhalaci odpojte hadici, rozeberte na jednotlivé části nebulizační nádobku.

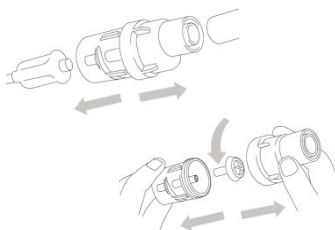

2 Umyjte všechny části nebulizační nádobky ve vlažném mýdlovém roztoku. Nikdy nedrhněte trysku kartáčem – zničí se! Nechejte volně oschnout.

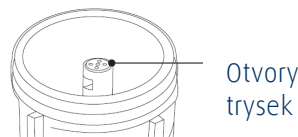

Otvory trysek


3 Nikdy nepoňujte průhlednou hadici ani vzduchový filtr do žádné kapaliny. Znečistí-li se, je nutné je vyměnit. Nebulizační nádobku s tmavě modrou horní částí ani její součásti nevyvařujte!

4 Roztoky bohaté na minerály, např. Vincentka, více zanášejí trysky. Ponořte 1-2krát za 14 dní na 15 minut nádobku s tryskami do misky s octem, opláchněte.

Novou sadu (nebulizační nádobka + hadice + náustek) nebo jen nebulizační nádobku si můžete zakoupit v lékárně či prodejně ZP. Distribuci do lékáren a výdejen ZP zajišťuje: LIFTEC CZ, tel.: 296 411 815 nebo 835 nebo: logistika@liftec.cz

Stručný návod k použití kompresorového inhalátoru

InnoSpire Essence

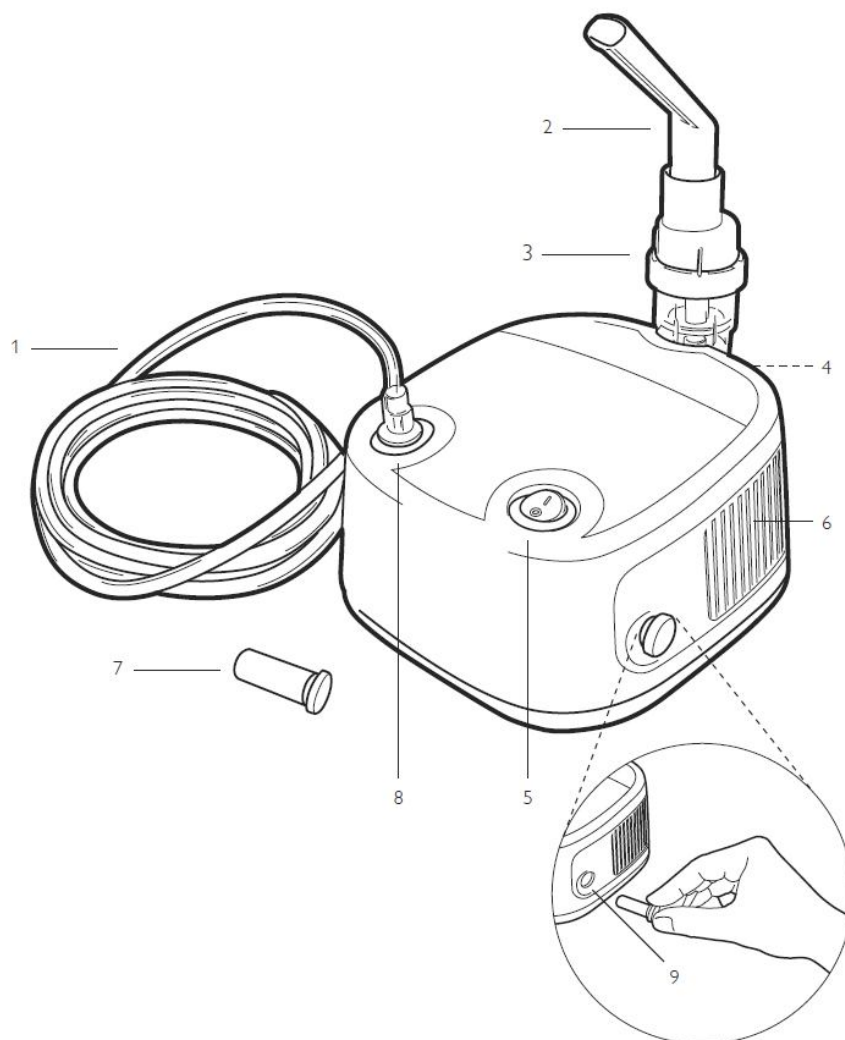

- 1 – průhledná hadice Duratube
- 2 – náústek
- 3 – nebulizační nádobka SideStream k „jednorázovému“ použití (tmavě modrá) na inhalační léčivo (výrobce zaručená doba životnosti a výkonu nejméně 14 dní)
- 4 – úchyt pro upevnění nádobky SideStream
- 5 – tlačítko zapínání/ vypínání kompresoru inhalátoru
- 6 – vzduchové průduchy
- 7 – filtr
- 8 – výstup pro napojení průhledné hadice Duratube
- 9 – umístění filtru (jeho vytažení a eventuální výměna při znečištění)

